


Take it EasyTM

**Drei einfache und wichtige Fakten,
die beim Vergleich von Abschirmsystemen
zu beachten sind**

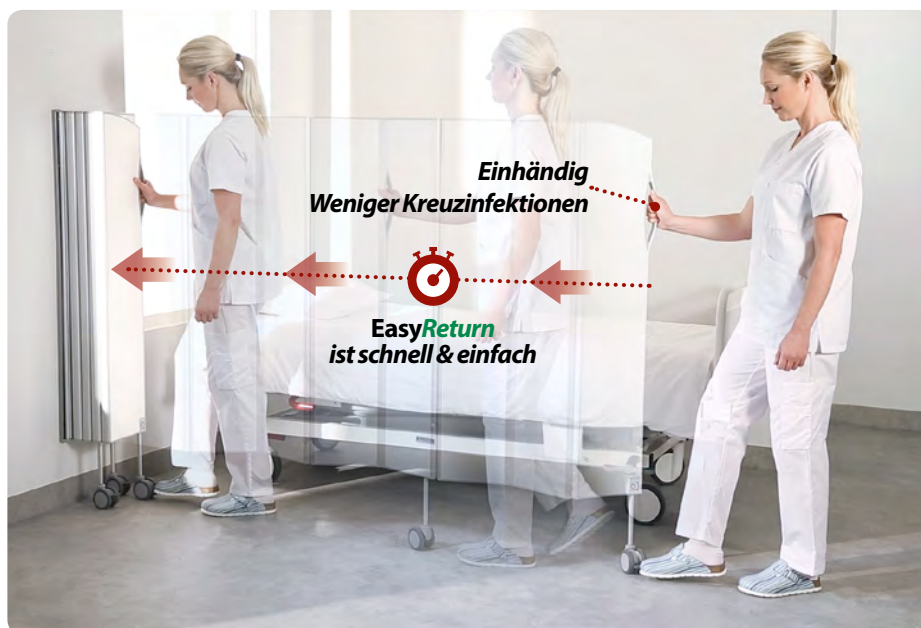

1. EasyReturn

Schnell und einfach zurück zu schieben

Leichtes Material und Built-in Memory für schnelle und einfache Rückstellung in die Ausgangsstellung.

Der One Touch Handgriff bedeutet:

- Beim Bewegen der Faltschirm müssen mit den Händen keine Flächen berührt werden.
- Aufgrund der Einhandbedienung, kommt es zu weniger Kreuzinfektionen.

2. EasyClean

Optimale Infektionsvorbeugung

Das Silentia Abschirmsystem erfüllt strikte Hygieneanforderungen.

- Alle Oberflächen sind glatt und leicht zugänglich.
- Alle Oberflächen widerstehen den heute im Pflegebereich verwendeten Desinfektionsmitteln.



Scannen Sie den QR-Code.

Sehen Sie im Take-it-Easy-Film die Handhabung! Oder gehen Sie auf unsere Website: silentia.at

Nehmen Sie für eine unverbindliche Vorführung gerne Kontakt mit uns auf

Unser Produktspezialist führt Ihnen das Produkt gerne unverbindlich vor und ermöglicht Ihnen eine testweise Verwendung. Gerne unterstützen wir Sie dabei, die richtige Lösung für Ihr Arbeitsumfeld zu finden.

3. *Mobilität* leicht gemacht

Platzsparende und sichere mobile Faltschirme von Silentia

Die Silentia Faltschirm ist als Bettgiebelwand und als mobiler Faltschirmwagen erhältlich. Beide Lösungen bieten bei Bedarf mobile Privatsphäre.



Die Bettgiebelwand und der mobile Faltschirmwagen haben eine der geringsten Stellflächen auf dem Markt. Sie nehmen minimalen Platz ein und stehen in unterschiedlichen Höhen zur Verfügung: 1,45 m, 1,65 m und 1,85 m für den mobilen Faltschirmwagen und 1,55 m und 1,85 m für die Bettgiebelwand.

Alle Funktionen sind von der Vorderseite leicht zu bedienen.



1 Platzieren Sie die Faltschirm an die gewünschte Stelle, verriegeln Sie die beiden vorderen Rollen des Faltschirmwagens.

2 Lassen Sie die Silikonschnur los.

3 Ziehen Sie die Faltschirm mit einer Hand aus. Dadurch kommt es zu weniger Kreuzinfektionen.



Scannen Sie den QR-Code. Sehen Sie im Take-it-Easy-Film die Handhabung! Oder gehen Sie auf unsere Website: silentia.at

Nehmen Sie für eine unverbindliche Vorführung gerne Kontakt mit uns auf

Unser Produktspezialist führt Ihnen das Produkt gerne unverbindlich vor und ermöglicht Ihnen eine testweise Verwendung. Gerne unterstützen wir Sie dabei, die richtige Lösung für Ihr Arbeitsumfeld zu finden.